

- **Hinweis:** Bei den Testkeimen, die sich auf den Bioindikatoren befinden handelt es sich nicht um Krankheitserreger, so dass von diesen Keimen keine Gefahr ausgeht, auch wenn bei nicht funktionierenden Programmen eine Kontamination des aufzubereitenden Gutes mit diesen Testkeimen erfolgt. In einem solchen Falle sind die von dem vorherigen Patienten stammenden Keime die Gefahr und nicht die Testkeime der Bioindikatoren.

## 1. Indikatoren, die verpackt in dem zu prüfenden Gerät eingebracht werden

Bioindikatoren zur Prüfung von Sterilisationsanlagen, Dampfdesinfektionsanlagen, Waschmaschinen für Textilien. Die Bioindikatoren können vor und nach der Behandlung im Gerät mit den Händen angefasst werden. Die Verpackungen sind keimdicht, so dass keine Kontamination erfolgt!

## 2. Indikatoren, die offen in die Geräte eingelegt werden

- **Hinweis:** In dem zu prüfenden Programm so viele Pinzetten aufbereiten, wie Indikatoren eingelegt werden oder die erforderliche Anzahl an Pinzetten steril vorhalten.
- **2.1** Die Anordnung der Indikatoren in dem zu prüfenden Gerät kann mit aufbereiteten unsterilen Pinzetten oder Einmalhandschuhen erfolgen.
- **2.2** Die Transportröhrchen im normalen Abfall entsorgen.
- **2.3** Nach Abschluss der Aufbereitung jeden Indikator mit einer aufbereiteten/sterilen Pinzette entnehmen und einzeln in sterile Transportröhrchen geben.

## 3. Indikatoren zur Prüfung von RDGE (Endoskopaufbereitung)


- **Hinweis:** Den Indikator mit Einmalhandschuhen aus der Verpackung nehmen.



### Der Indikator:

2 m Teflonschlauch


Die Kappen an den Enden abziehen

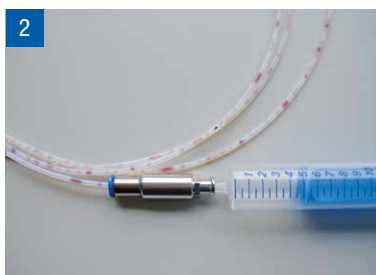

### Durchgängigkeit des Indikators prüfen und Anschluss an ein RDGE:

Den Bioindikator mit dem der Lieferung beigefügten Adapter und einer Spritze verbinden. Den Kolben der Spritze leicht aufziehen. Bewegt sich das Blut im Indikator, so ist die Durchgängigkeit gegeben.

Den Indikator mit dem passenden Adapter an das RDGE anschließen.

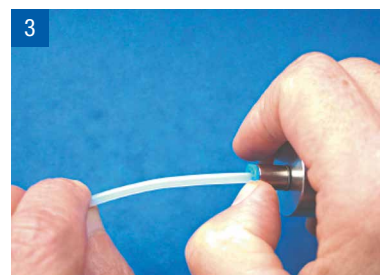

### Anschluss und Lösen des Indikators vom Adapter

Den Indikator durch leichten Druck auf den Adapter stecken

Der Indikator kann durch leichten Druck auf den blauen Ring in Richtung Adapter vom Adapter gelöst werden.

- Transportbeutel und Spritze im normalen Abfall entsorgen.
- Nach Programmende den Indikator mit Einmalhandschuhen aus dem RDGE entnehmen und einzeln in einen unbenutzten Papier-Folienbeutel geben. Eine äußere Kontamination des Indikators hat keinen Einfluss auf das Prüfergebnis.
- **Allgemein:** Die Bioindikatoren im Untersuchungsantrag eintragen. Die Reinigungsleistung durch optische Kontrolle des Indikators prüfen und im Formblatt zur Dokumentation der Reinigungsleistung eintragen. Den Bioindikator zur Prüfung der Desinfektionsleistung zur Auswertung an Ihr Labor senden.
- **Hinweis:** Den Bioindikatoren wird je eine Sterilisationsverpackung zur Aufnahme der Bioindikatoren nach der Geräteprüfung zwecks Transport in Ihr Labor beigefügt.